

NASOMAR - Instruções de utilização

A água do mar das fórmulas de Nasomar é extraída da costa da Bretanha (França), num local natural, preservado e altamente qualificado (NATURA 2000).



NASOMAR Infantil
Dispositivo médico de classe IIa
Solução isotónica* para
pulverização nasal
Higiene nasal

Os recém-nascidos só conseguem respirar através do nariz, e as crianças com menos de 3 anos não conseguem assoar o nariz. Isto significa que uma constipação afeta seriamente a respiração da criança e causará dificuldades em dormir e alimentar-se. É para evitar essas complicações que a higiene nasal preventiva é importante.

Nasomar Infantil é uma solução de limpeza nasal para a higiene diária do nariz da sua criança. O seu aplicador especialmente adaptado a narinas pequenas e a microdifusão asseguram uma limpeza suave. A respiração da criança é facilitada e a mucosa nasal fica saudável e protegida.

COMPOSIÇÃO

Solução de água do mar isotónica*.
Sem conservantes.

*Solução de água do mar diluída com água purificada. Concentração de sal (NaCl) igual às células do organismo (9 g/L).

MODO DE UTILIZAÇÃO

1 a 3 pulverizações em cada narina, até 6 vezes por dia, conforme necessário.
Crianças a partir de 1 mês de idade.



NASOMAR Adulto
Dispositivo médico de classe IIa
Solução isotónica* para
pulverização nasal
Higiene nasal

Para prevenir as patologias nasais, tais como constipações e alergias ou para facilitar a sua recuperação é recomendada uma boa higiene nasal. Esta ajuda a remover o excesso de secreções e alergénios e humidifica a mucosa nasal para otimizar a respiração.

Nasomar Adulto ajuda a remover o excesso de secreções e alergénios e permite a limpeza das vias nasais. A sua utilização regular assegura uma atividade nasal saudável.

A microdifusão da solução permite uma limpeza suave e eficaz que facilita a respiração.

COMPOSIÇÃO

Solução de água do mar isotónica*.
Sem conservantes.

*Solução de água do mar diluída com água purificada. Concentração de sal (NaCl) igual às células do organismo (9 g/L).

MODO DE UTILIZAÇÃO

1 a 3 pulverizações em cada narina, até 6 vezes por dia, conforme necessário.
Adultos e crianças a partir de 3 anos.



NASOMAR Descongestionante
Dispositivo médico de classe IIa
Solução hipertónica* para
pulverização nasal

DIFUSÃO DINÂMICA E EFICIENTE

Nasomar Descongestionante é uma solução eficaz para limpar e aliviar rapidamente o seu nariz. Facilita a eliminação de excesso de secreções e agentes patogénicos e reduz os sintomas de constipações, rinosfaringites, sinusites e rinites alérgicas.

A microdifusão do produto é particularmente adaptado para limpar e eliminar o excesso de secreções, permitindo desobstruir um nariz bastante congestionado.

100% natural e sem conservantes, combina os benefícios da água do mar hipertónica* com o desempenho de uma microdifusão para uma melhor eficiência.

COMPOSIÇÃO

Solução de água do mar hipertónica*.
Sem conservantes.

*Solução de água do mar diluída com água purificada. Concentração de sal (NaCl) mais elevada que nas células do organismo (21 g/L).

MODO DE UTILIZAÇÃO

1 a 2 pulverizações em cada narina, 2 a 3 vezes por dia, até que os sintomas desapareçam.
Adultos e crianças a partir de 1 ano.

NASOMAR Infantil

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO



- Incline a cabeça da criança para o lado, mas não para trás.
- Insira suavemente a ponta do aplicador na narina superior.
- Pressione o aplicador.
- Assoe o seu nariz para remover o excesso, se necessário.
- Repita a operação na outra narina.
- Para evitar contaminação, limpe o aplicador depois cada utilização com água quente com sabão e depois enxague.
- Utilizar à temperatura ambiente.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Para uso individual (um pulverizador por pessoa).
- Não utilizar se o produto estiver de alguma forma danificado.
- Não utilizar após a data de validade.
- Crianças com menos de 10 anos devem ser supervisionadas por um adulto.
- Não utilizar em caso de alergia ou hipersensibilidade a um dos ingredientes.
- Se ocorrer algum incidente grave relacionado com a utilização deste dispositivo médico,

NASOMAR Adulto

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Insira delicadamente a ponta do aplicador numa das narinas.
- Pressione o aplicador.
- Assoe o nariz para remover o excesso, se necessário.
- Repita a operação na outra narina.
- Para evitar contaminação, limpe o aplicador depois de cada utilização com água quente com sabão e depois enxague e seque, antes de guardar o produto.
- Utilizar à temperatura ambiente.

fale com um profissional de saúde e notifique o fabricante e a autoridade de saúde (INFARMED).

- Manter fora do alcance e da vista das crianças.
- Se tiver dúvidas ou se os sintomas persistirem, consulte o seu farmacêutico ou médico.
- Por favor, elimine este produto de acordo com as orientações locais de reciclagem e respeite o ambiente.

ADVERTÊNCIAS

Atenção: Recipiente sob pressão: risco de ex-

NASOMAR Descongestionante

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Insira delicadamente a ponta do aplicador numa das narinas.
- Pressione o aplicador.
- Assoe o nariz para remover o excesso, se necessário.
- Repita a operação na outra narina.
- Para evitar contaminação, limpe o aplicador depois de cada utilização com água quente com sabão e depois enxague e seque, antes de guardar o produto.
- Utilizar à temperatura ambiente.

plusão sob a ação do calor. Manter afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não fumar. Não furar nem queimar, mesmo após utilização. Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F.

EFEITOS INDESEJÁVEIS

Em casos raros, a utilização do pulverizador pode causar desconforto ou até um ligeiro sangramento nasal. Esses efeitos não são graves e desaparecem rapidamente.



Faes Farma Portugal, S.A.
Rua Elias Garcia, 28
2700-327 Amadora • Portugal



YSLAB
2, rue Felix Le Dantec
29000 Quimper • France



	Fabricante
	Distribuidor
	Número de lote
	Data de validade
	Consultar as instruções de utilização

	Marcação CE com o n.º de referência do organismo notificado
	Múltiplas utilizações num único doente

Data da aprovação da marcação CE: 2023.

Data de revisão do texto: junho de 2023, V1.

NONSM_CODIVPTV1

ANA90YS33A

