

Leia atentamente as instruções de utilização antes de usar este produto. Conserve-as, uma vez que pode ter necessidade de as ler novamente. Não partilhe este produto com outros. Caso necessite de informações adicionais ou ainda tenha dúvidas, consulte o seu médico ou farmacêutico.

### O que é oti FAES BoriSEC e para que é utilizado:

O spray auricular **Oti FAES BoriSEC** seca o canal auditivo externo e alivia a sensação de ouvido tapado devido à acumulação de água durante a higiene diária (no banho, no duche, ao lavar o cabelo), na prática de desportos aquáticos (natação, surf, canoagem, mergulho, vela) ou pela frequência de ambientes húmidos (saunas, balneários ou ginásios).

Nas situações acima mencionadas, **Oti FAES BoriSEC** está indicado para aplicação no canal auditivo externo, onde exerce uma tripla ação:

- Evaporação do excesso de água.
- Recuperação do pH fisiológico, já que regula o pH ótimo do canal auditivo.
- Proteção da pele do ouvido.

Graças à sua composição e indicações, **Oti FAES BoriSEC** proporciona as condições adequadas para prevenir a proliferação de agentes patogénicos que podem originar uma otite externa, também conhecida como "ouvido de nadador", ou seja, previne as infeções do canal auditivo externo.

**Oti FAES BoriSEC** é adequado para uso em adultos e crianças a partir dos 9 anos de idade.

### Como utilizar oti FAES BoriSEC:

**Oti FAES BoriSEC** administra-se usando o aplicador auricular, especialmente concebido para se adaptar ao canal auditivo externo.

**Oti FAES BoriSEC** deve ser utilizado logo após a exposição ou contacto com a água. Antes de utilizar o produto, elimine o excesso de água do ouvido com uma toalha ou pano limpo, sem o introduzir no canal auditivo.


**Importante:** antes de cada utilização, deverá fazer uma purga do dispositivo, pulverizando repetidamente fora do canal auditivo externo, até que seja libertado líquido. De seguida, siga os passos indicados nas imagens.

Se usa aparelhos auditivos, deve retirá-los antes de utilizar **Oti FAES BoriSEC**.

A forma de administração de **Oti FAES BoriSEC** está descrita nas imagens abaixo:




1. Após a exposição ou contacto com a água, incline a cabeça.

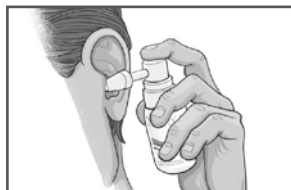

2. Introduza cuidadosamente o aplicador no ouvido e pressione o aplicador uma vez. Espere 30 segundos, mantendo a cabeça inclinada.



3. Gire a cabeça no sentido oposto para libertar o líquido remanescente. Qualquer líquido residual evaporará em alguns minutos.

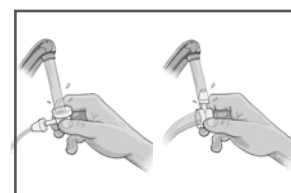

4. **IMPORTANTE:** após cada utilização, retire o aplicador e enxague abundantemente com água ambos os extremos para que se mantenha nas melhores condições de utilização. Seque-o e guarde-o até à próxima utilização.

Guarde o aplicador desmontado junto com o frasco dentro da caixa para uma conservação adequada.

**Oti FAES BoriSEC** pode ser utilizado sempre que necessário, até um máximo de 2 vezes por dia. Não use mais de 30 dias seguidos.

É recomendada a utilização de **Oti FAES BoriSEC** em caso de acumulação de água no canal auditivo externo, depois da realização da higiene diária, práticas desportivas aquáticas ou de ter frequentado ambientes húmidos.

### Quem não deve usar oti FAES BoriSEC:

- Se tem alergia a algum dos seus ingredientes.
- Se sofre de qualquer tipo de otite (por exemplo: dor, infeção, formação de pus).
- Se tem ou suspeita de perfuração do tímpano.
- Se recentemente foi submetido a alguma intervenção ao ouvido, a menos que o médico o autorize especificamente.
- Se a pele do canal auditivo estiver lesada ou ferida.
- Se está grávida ou a amamentar.
- Em crianças com idade inferior a 9 anos.

### Precauções e possíveis efeitos indesejáveis:

Este produto pode causar efeitos indesejáveis, embora estes não se manifestem em todas as pessoas.

Está descrito que as soluções auriculares podem provocar mal-estar, dor, perda transitória de audição (devido à presença de líquido no canal auditivo), tonturas, irritação na pele.

Se sentir dor, desconforto excessivo ou perda de audição, bem como possíveis efeitos indesejáveis não mencionados acima, pare de utilizar o produto e consulte seu médico.

Não use simultaneamente com outros produtos auriculares. Em caso de dúvida consulte o seu médico ou farmacêutico.

Não reutilizar o frasco.

Não utilizar após a data de validade indicada na embalagem, mesmo que o frasco não tenha sido aberto.

### Advertências:

**Oti FAES BoriSEC** é um produto para aplicação exclusiva no ouvido. Evite o contacto com a boca, nariz e olhos. Em caso de contacto com os olhos, lavar imediatamente com água abundante.

Inflamável. Manter o produto afastado de qualquer chama ou fonte de calor.

Não ingerir. Pode ser tóxico após ingestão acidental.

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV) – 800 250 250.

Qualquer incidente grave ocorrido com **oti FAES BoriSEC** deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente (Infarmed, I.P.).

### Como conservar oti FAES BoriSEC:

Manter fora do alcance das crianças.

Conservar em local fresco e seco e a temperatura inferior a 30 °C.

Manter o produto afastado de qualquer chama ou fonte de calor.

Não congelar.

Conservar na posição vertical.

Não utilizar passado 12 meses após a abertura.

Conservar na embalagem de origem e com as instruções de utilização.

### Composição:

Etanol 70 %, ácido bórico 3 %, glicerina 3 %.

Data da última revisão do texto: março 2024.

Apenas para uso externo, de aplicação exclusiva no ouvido.

Spray auricular 30 ml.

